

DuBaSafe fix és lehajtható kapaszkodó, fürdetőszék, támaszkodó állvány acélból illetve rozsdamentes acélból

A segédeszközök maximum 125 kg-os (XXL típusok 200 kg) testtömegig használhatóak, de ez kevesebb is lehet a rögzítés módjától és a falazattól függően.

BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK:

- A terméket csak a rendeltetési céljának megfelelően használja!
- Minden használat előtt szemrevételezéssel ellenőrizze a külső sérüléseket!
- Tisztítás után ellenőrizze az ülés (ülőrész) kapcsolódását és illeszkedését!
- A deformálódott eszközt ne igazítsa helyre, ne használja többet!
- Figyeljen arra, hogy a szappan és a fürdőfolyadékok megnövelik a csúszásveszélyt!
- Az ülést csak óvatosan hajtsa fel becsípődésveszély miatt!
- A gyártó a termékfelelősség körében sem felel olyan veszély- és károkozásért, melyek felügyelet nélküli gyermekekkel történhetnek a termék használata kapcsán.

ÁPOLÁS, KARBANTARTÁS:

A vázról és a műanyag részekről a szennyeződés hagyományos tisztítószerrel eltávolítható. Vegye figyelembe a tisztítószer tájékoztatóját is!

Csak hagyományos szereket alkalmazzon a fertőtlenítéshez, tisztításhoz, ne pedig maró- és oldó hatású anyagokat!

A stabil felépítés és az ellenálló anyagok felhasználása ellenére a termék idővel elhasználódhat. Ezért **javasoljuk, vizsgálta át a széket 6 havonta, főleg a csavar- és a szorító kötéseknel.**

SZERELÉSI ÚTMUTATÓ:

Figyelem! A szerelést - lehetőleg - bízza szakemberre, mert eközben megsérülhetnek a falban a nem látható vízvezetékek, elektromos kábelek. Az ilyen jellegű károsodásokért felelősséget vállalni nem áll módunkban!

1. A kívánt ülés magasságot válassza ki!
2. Állítsa a fürdető széket, kapaszkodót a kívánt helyre és szintezze be egy vízmértékkel!
3. Jelölje be a csavarok helyét! Sablonként használja a fali tartót!
4. Szerelje az ülést a falra!

Figyelem! Csak a fal szerkezetének megfelelő tiplit/csapot használjon!

Általános rögzítési célokra Ø8 mm-es műanyag tiplit és 60 mm hosszú lencsefejú csavart javasolunk.

Ez megfelel beton falhoz, legalább 20 cm vastag téglá illetve blokk téglá falazathoz, továbbá legalább 25 cm vastag Ytong vagy gázbeton falazathoz.

Garancia:

A Meyra általános üzleti feltételei érvényesek.

Magyarországon a Meyra-Ortopedia Kft., mint első forgalomba hozó, az eladás dátumától számított 12 havi jótállást vállal a termékre rendeltetészerű használat esetén.

- ◇ Ezt a tájékoztató, mely garanciajegyként is szolgál, gondosan őrizze meg, mert az esetleges meghibásodásokat csak ennek meglétekor tudjuk orvosolni. A garanciajegy pótlása csak az eredeti számla bemutatásával lehetséges.
- ◇ Az eszköz időszakos karbantartása, rendszeres tisztítása, mozgó alkatrészek kenése és a csavarok utána húzása a Tulajdonos feladata. Ennek elmulasztásából származó hibákért felelősséget vállalni nem áll módunkban. Javításra csak megtisztított eszközt veszünk át.
- ◇ A gumi- és műanyag alkatrészek (ülőlapp és gumilábak) kopására, nem gyártási hibából eredő károsodására, a lakkolás illetve krómoxidáció rongálódására a garancia nem terjed ki
- ◇ Ha bármilyen rendellenességet tapasztal, kérjük, hívja fel szakszervizünket a 06 (1) 230 0593 telefonszámon, vagy jelentse be e-mailben a szerviz@meyra.hu címen.

Az eladás dátuma:

Forgalmazó pecsétje, aláírása: