

## **Kerék hátrahelyező adapter szerelési utasítása**

### **Service Standard 3.600**

1. Lábtartók leszerelése, kerekesszék előre döntése.
2. Meghajtó kerék porvédő kupakjainak eltávolítása.
3. Meghajtó kerék kiszerelése, (19-es kulcsok).
4. Taposó gumik lehúzása.
5. Az acélperselyt, ( $\varnothing 12 \times 8$  mm) a tengely helyére behelyezni.
6. Az adaptert rátoljuk a kerekesszék vázára, a  $\varnothing 8$  mm furatok fedjék egymást.
7. Az adaptert M8-as kapupánt vagy M8 x 55 süllyesztett fejű csavarokkal (a), alátéttel és anyával (b, c) rögzítjük.
8. A nagykerekeket a tengellyel az adapter,  $\varnothing 12$  mm-es furatába helyezzük és rögzítjük. Fix keréknél ügyeljen az anya alatti alátét meglétére!
9. Taposó gumikat visszahelyezzük, szükség szerint belső felületüket ragasztózzuk.
10. Porvédőket a meghajtó kerék anyáira visszahelyezzük.
11. Fékek beállítása, kengyel meglazítása után, majd a kerekekhez állítás és rögzítés.

