



HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ ARDO POLYSOFT MATRACHOZ
Az itt leírtak a német nyelvű útmutatóban foglaltak fordításai.

MEYRA®
ORTOPEDIA

A PolySoft

- Egy hatékony, levegővel töltött, statikus segédeszköz decubitus (felfekvés) megelőzésére.
- A poliuretán alapanyag bőrbarát, ellenálló, elasztikus és környezetbarát.
- A páciens mozgása által létrehozott szellőzést a matracon található hengeres nyílások segítik.

Használatba vétel

1. Fújja fel a PolySoft matracot a mellékelt kézi pumpával, ügyeljen arra, hogy ne legyen túl kemény!
2. Fektesse a pácienset a matracra.
3. Szükséges levegő mennyiség beállítása: csúsztassa a tenyerét a fekvő személy csípője alá
 - a. Csípő nem érezhető: túl kemény matrac → engedje ki egy kis levegőt!
 - b. Csípő teljesen tapintható: matrac túl lapos → levegőt utántölteni!
4. A töltési levegőmennyiséget időnként ellenőrizni!

Tisztítás/fertőtlenítés: A felületet célszerű nedves törölkendővel tisztítani. Javasolt langyos szappanos vízzel vagy enyhén lúgos tisztító vagy fertőtlenítő szerrel. Savas és oldószer bázisú tisztítószer alkalmazása tilos!

Tárolás: A PolySoft matracot soha ne tárolja felfújva! Javasoljuk a matracot egy száraz, közvetlen napsugárzástól védett, de 10 °C foknál melegebb helyen tárolni!

Egységcsomag tartalma: a rendszer 1 db matracból, 1 db kézi pumpából és 1 db használati útmutatóból áll.

Javítás: Bármely PolySoft matrac csak speciális PU-javító készlettel hozható rendbe.

Minőségi garancia:



A termék teljesíti az EU 93/42/EWG orvostechnikai eszközökre vonatkozó előírásait és megfelel a 16/2006 (III.27) EüM. rendeletnek. Az EüM Orvostechnikai Hivatalánál regisztrált I. osztályú termék.

Garancia:

Magyarországon a Meyra-Ortopedia Kft. mint első forgalomba hozó, az eladás dátumától számított 12 havi jótállást vállal a termékre az anyagszerkezetre rendeltetésszerű használat esetén.

- ◇ Ezt a tájékoztatót, mely garanciajegyként is szolgál, gondosan őrizze meg, mert az esetleges meghibásodásokat csak ennek meglétekor tudjuk orvosolni. A garanciajegy pótlása csak az eredeti számla bemutatásával lehetséges.
- ◇ Az eszköz rendszeres tisztítása a Tulajdonos feladata. Javításra csak megtisztított eszközt veszünk át.
- ◇ Az anyag természetes kopására, nem gyártási hibából eredő károsodására a garancia nem terjed ki
- ◇ Ha bármilyen rendellenességet tapasztal, kérjük hívja fel szakszervizünket a 06 (1) 230 0539 telefonszámon vagy a 06 (1) 394 5733 / 1255 melléken, ahol éjjel-nappal üzenetrögzítő fogadja hívásait, vagy jelentse be e-mailben a szerviz@meyra.hu címen.

Az eladás dátuma:

Forgalmazó pecsétje, aláírása: